

# Tom 2



progettato per storie più felici

# Vantaggi di Tom 2

NUOVA NORMA  
DI SICUREZZA  
PEDIATRICA EN  
50637:2017





- Massima sicurezza per il paziente pediatrico
- Design allegro



Paziente

- Letto ad azionamento completamente elettrico
- Accesso al paziente senza ostacoli



Personale

- Letto per bambini dall'eccezionale design moderno
- Nuova norma di sicurezza pediatrica EN 50637:2017




Gestione

# Sicurezza da tutti i punti di




## CHIAVE DI SICUREZZA

Il pannello di controllo è dotato di un meccanismo di autorizzazione. L'applicazione di una chiave speciale al simbolo del lucchetto consente di impostare il pannello di controllo nella modalità di funzionamento.

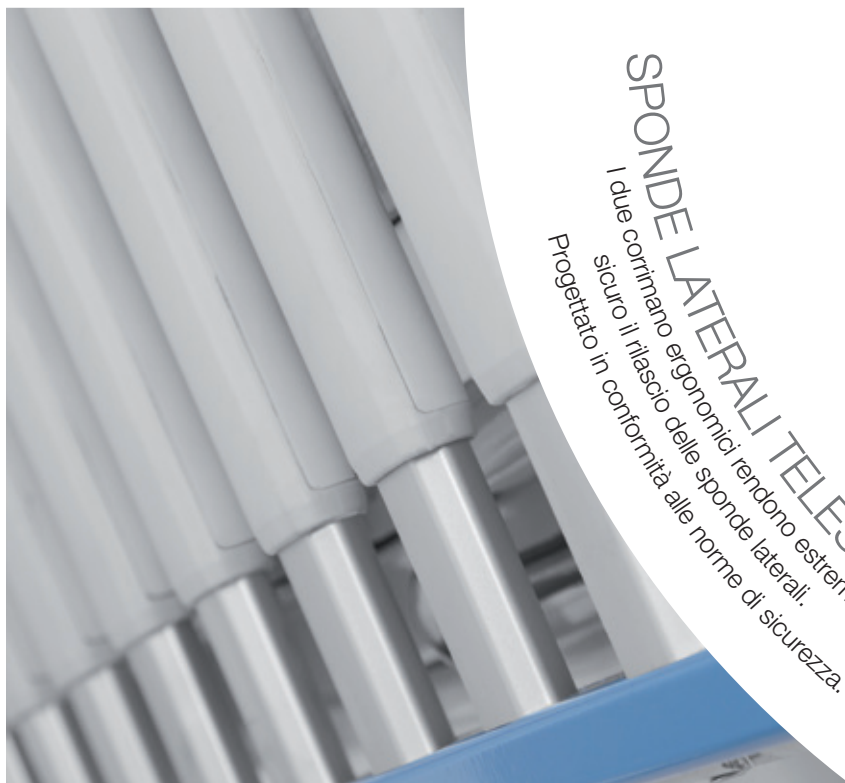

## SPONDE LATERALI TELESCOPICHE

I due corrimano ergonomici rendono estremamente sicuro il rilascio delle sponde laterali. Progettato in conformità alle norme di sicurezza.

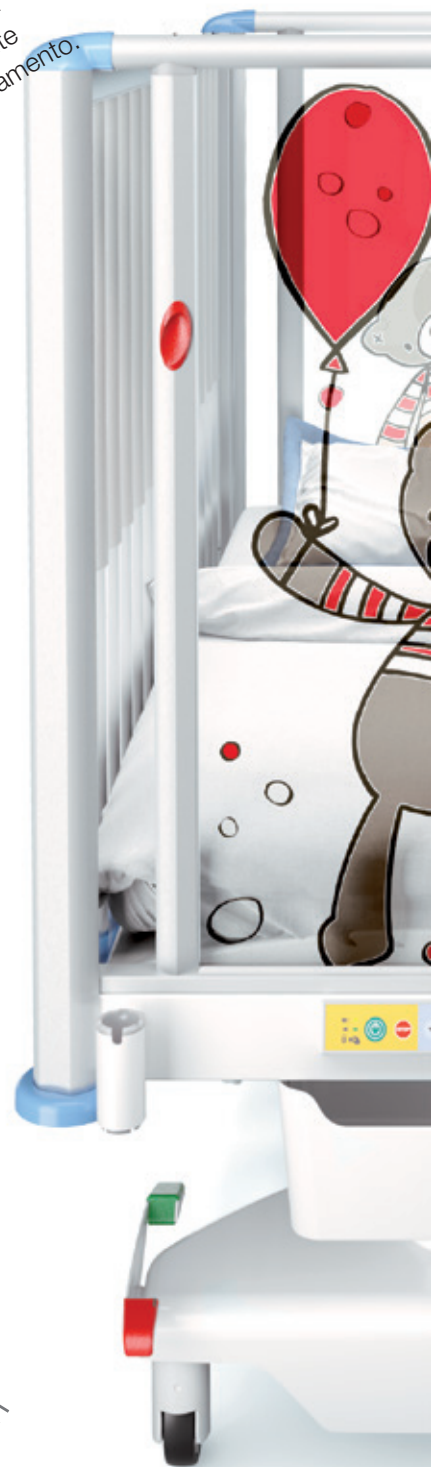

# vista



**ESTREMITÀ DEL LETTO RIMOVIBILI**  
Consente l'accesso completo al paziente, ed è disponibile anche in versione per terapia intensiva. Pannello altamente resistente ai danni.  
Sblocco intuitivo e immediatamente accessibile.



**DISTANZA ZERO**  
La regressione automatica assicura una distanza di sicurezza costante tra lo schienale e il lato testa del letto.  
Vengono mantenuti i principi del posizionamento ergonomico.



# Per sentirsi felici





## DESIGN MODERNO ED ESCLUSIVO

Grazie alla testiera e pediera trasparenti, il paziente è sempre in contatto con l'ambiente circostante, e può sentire i genitori e il personale sempre vicini. Il disegno colorato alle estremità del letto riflette il mondo giocoso dei bambini.



- SOGNI TRANQUILLI
- SENSAZIONE DI SICUREZZA



- VISUALE PERFETTA

# Progettato per i bambini





L'aspetto del letto Tom 2 è caratterizzato da linee pulite, materiali moderni e colori vivaci, che creano un'impressione piacevole e ispirano la fiducia del paziente pediatrico e dei genitori del bambino.



# Per guarire con il sorriso





## ESCLUSIVE SPONDE LATERALI TELESCOPICHE

- Il migliore accesso possibile ai pazienti pediatrici
- 5 posizioni regolabili in altezza delle sponde laterali



◀ 80 cm **La massima SICUREZZA**

◀ Posizione intermedia

◀ 40 cm **La migliore VISUALE**

◀ Posizione intermedia

◀ 0 cm **Il più semplice ACCESSO**

◀ 13 cm Spazio e distanze sicuri in tutte le posizioni delle sponde laterali.



## SUPPORTI PER FLEBO

Le aste portaflebo sono fissate direttamente alla struttura del letto in conformità alla nuova norma pediatrica 50637.

# Posizionamento confortevole



## POSIZIONAMENTO ELETTRICO

L'altezza del letto, l'inclinazione dello schienale e la posizione TR/ATR possono essere regolate tramite il pannello di controllo. Il tasto GO (avvio) e il tasto STOP (arresto) assicurano che il letto possa essere bloccato in sicurezza, impedendo così spostamenti accidentali.

**Per comodi**  
ESAMI

83 cm ▶

**Per una sicura**  
USCITA DAL LETTO

58 cm ▶

## STRUTTURA DELLA COLONNA

È una delle caratteristiche uniche del letto, e consente la regolazione dell'altezza. Garantisce una perfetta stabilità, igiene e accesso illimitato a tutte le parti del letto.



# Dettagli pratici

- 1 Luce notturna
- 2 Porta-accessori
- 3 Vano porta-accessori
- 4 Barre porta-accessori
- 5 Freni centrali
- 6 CPR manuale
- 7 Mini ACP





#### PARAMETRI ELETTRICI

Alimentazione	230 V/±10%
Ingresso massimo	max. 1,6 A, 370 VA
Protezione da acqua e polvere	IPX4

#### CERTIFICATI

LINET è certificata secondo gli standard normativi e di qualità europei. EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, ISO 14971. Il letto TOM 2 è pienamente conforme alla nuova norma pediatrica EN 50637:2017.

LINET aderisce a un sistema di gestione della qualità certificato, in conformità alle seguenti norme: ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485. MDSAP (Medical Device Single Audit Program).

#### PARAMETRI TECNICI

Dimensioni esterne	151×83 cm
Dimensioni del materasso consigliate	137×70/10 cm
Carico di lavoro in sicurezza	80 kg
Altezza del piano rete (min-max) (a regolazione elettrica)	58 cm-83 cm
Inclinazione TR/ATR (a regolazione elettrica)	15°/15°
Altezza sponde laterali max	80 cm
Regressione automatica dello schienale	12,5 cm
Sezioni del piano rete	2
Peso (a seconda delle apparecchiature)	120 kg
Angolazione massima dello schienale (a regolazione elettrica)	41°
Controllo delle ruote centrale	Sì

# Tom 2

Paziente

- Massima sicurezza per il paziente pediatrico
- Design allegro



- Letto ad azionamento completamente elettrico
- Accesso al paziente senza ostacoli



Personale

Gestione

- Letto per bambini dall'eccezionale design moderno
- Nuova norma di sicurezza pediatrica EN 50637:2017



 wissner-  
bosserhoff

**LINET**

Members of LINET Group

**LINET spol. s r.o.**

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Repubblica Ceca  
tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: [info@linet.com](mailto:info@linet.com) | [www.linet.com](http://www.linet.com)

